

## Q.C.M.リテーナーワイヤの使用上の注意に関するご連絡

このたび、医療機器 Q.C.M.リテーナーワイヤ樹脂部分において、強アルカリ性の「洗浄剤」「電解研磨用液」に浸漬した場合に、クラックが発生したり、また短時間の浸漬で外観上問題ない場合でも、患者さんの使用中に比較的短期間で破折する可能性が判明いたしました。これらの溶液中に樹脂部分を浸漬しない、または Q.C.M.リテーナーワイヤには使用しないよう宜しくお願い致します。

### 【洗浄剤使用に関してのお願い】

- ・強アルカリ性の義歯洗浄剤や、リテーナー洗浄剤を使用しないで下さい。  
次亜塩素酸系洗浄剤などお洗浄剤では強度劣化など材質に影響を与える可能性があります。
- ・強アルカリ性の電解研磨用液は使用しないでください。  
リン酸など一部の研磨用液では強度劣化など材質に影響を与える可能性があります。
- ・汚れに対するお手入れは流水で洗い流すことをお勧めしております。  
洗浄剤の使用に関しましては、下表をご参考いただきますようお願いいたします。

### 【ご使用いただけない洗浄剤】

商品名	メーカー名	備考
デントクリーン	亀水化学工業（株）	歯科医院／技工所専用義歯洗浄剤
ラバラックD	サンデンタル（株）	歯科医院／技工所専用義歯洗浄剤

\*PH12 以上の強アルカリ性洗浄剤

### 【ご使用可能な洗浄剤】

商品名	メーカー名
リテーナークリーナー	（株）ジーシー
リテーナーブライト	（株）オーラルケア
リテーナーシャイン	ライオン歯科材（株）（㈱ロッキーマウンテンモリタ）
一般にドラッグストア等で市販されている入れ歯洗浄剤	アース製薬（株）、小林製薬（株）

本件のお問い合わせ先

チカミミルテック株式会社 : 地福（じふく） TEL 088-822-1181  
株式会社オペラ : 増岡保治 TEL 044-572-8727

